

Inhaltsverzeichnis

Zweckbestimmung	1
Sicherheitshinweise	2
Allgemeine Warnhinweise!	2
Warnhinweise für das Falten des Rollators TRA32M	2
Besonderheiten des Rollators TRA32M	3
Vor der Benutzung	4
Montage	4
Pflege- und Wartungshinweise	7
Entsorgung	7
Gewährleistung	7
Technische Daten	8
Gesetzliche Grundlagen für das Inverkehrbringen in der EU	8
Erklärung der Symbole und Bildzeichen	8

Zweckbestimmung

Der Rollator dient zur Unterstützung der Beinfunktion beim Gehen.

Benutzen Sie Ihren Rollator nicht, wenn Sie andere körperliche Einschränkungen haben, durch die die Nutzung des Rollators unsicher wird, zum Beispiel bei geschwächter/eingeschränkter Armfunktion, Gleichgewichtsstörungen, usw.

Der Rollator ist ausschließlich als Gehhilfe für eine Person mit einem maximalen Körpergewicht von 200 kg vorgesehen.

Indem Sie sich mit den oberen Extremitäten und dem Rumpf auf den Rollator stützen oder diesen verschieben, gleicht der Rollator die verminderte Belastbarkeit oder Leistungsfähigkeit der unteren Extremitäten aus. Außerdem sorgt er für eine bessere Unterstützung und Sicherheit beim Gehen.

Der Rollator kann sowohl innen wie außen genutzt werden.

Der Rollator ist nicht für den Transport von Gegenständen und/oder von mehr Personen als dem Benutzer vorgesehen.

Er darf nur auf einem ebenen Untergrund verwendet werden, bei dem alle Räder und Stützen Bodenkontakt haben. Nutzen Sie den Rollator nicht auf steinigen, holperigen oder sandigen Böden oder starkem Gefälle, da sonst Kippgefahr besteht. Führen Sie den Rollator beim Gehen immer über einen ebenen, stabilen Untergrund und abgesenkte Bordsteinkanten.

Jede andere Verwendung gilt als zweckentfremdet und schließt eine Gewährleistung/Haftung aus.

Sicherheitshinweise

Achtung! Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch unbedingt diese Gebrauchsanweisung. Wenn Sie einzelne Warnungen oder andere Teile dieser Gebrauchsanweisung nicht verstehen, wenden Sie sich bitte an den Händler oder an den Kundendienst (Siehe Seite 9), um Schäden am Gerät und Verletzungen des Benutzers vorzubeugen.

- Folgen Sie unbedingt dieser Anweisung beim Zusammensetzen des Rollators.
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Handgriffe immer auf einer Höhe befinden.
- Vor jeder Nutzung des Rollators überzeugen Sie sich von der fehlerfreien Funktion der Bremsen.
- Der Rollator ist ausdrücklich nur für die beschriebene Funktion vorgesehen.
- Die Räder und die Bremsen sind Verschleißteile. Sie sind regelmäßig zu warten und gegebenenfalls zu wechseln. Informationen dazu erhalten Sie beim Kundendienst.
- Der Rollator ist für Personen mit einem Höchstgewicht von 200 kg ausgelegt.
- Die Tasche darf mit einem Gewicht von maximal 5 kg belastet werden

Allgemeine Warnhinweise!

- Der Rollator darf nicht als Rollstuhl benutzt werden.
- Prüfen Sie bevor Sie sich auf dem Rollator setzen, dass die rechte und die linke Bremse als Feststellbremse sicher funktionieren.
- **Überdehnen Sie die Rückenlehne nicht gewaltsam!**
- Stellen oder setzen Sie sich niemals auf den Rollator, wenn er sich bewegt.
- Benutzen Sie den Rollator niemals auf Sand, Kies, öligen oder unebenem Grund.
- Der Rollator ist nicht geeignet, um bei Schnee und Eis verwendet zu werden.
- Benutzen Sie den Rollator besonders vorsichtig bei den folgenden Bedingungen:
 - unebenen Gehwegen
 - unüberschaubaren Verkehrsbedingungen
 - Dunkelheit
 - abschüssigen Gelände

Während Sie mit dem Rollator gehen, fassen Sie beide Handgriffe an. Bewegen Sie den Rollator grundsätzlich nur mit den Handgriffen. Alle anderen Teile des Rollators sind zur Fortbewegung ungeeignet und schränken die Stabilität ein.

- Die Handgriffe sind nicht geeignet, dass an Ihnen Taschen, Beutel etc. transportiert werden. Ein derartiges Vorgehen würde zur ungleichmäßigen Belastung und zum Sturz führen.
- Versuchen Sie nicht den Rollator an beweglichen Teilen hochzuheben.
- Für Kinder unter 12 Jahren ist der Umgang mit dem Rollator nicht erlaubt.
- Reinigen Sie die Handgriffe nur mit warmem Wasser und einem handelsüblichen Spülmittel. Trocknen Sie die Handgriffe anschließend gut ab.

Warnhinweise für das Falten des Rollators TRA32M

- **ACHTUNG!** Quetschgefahr! Achten Sie beim Auseinander- und Zusammenfalten darauf, dass Sie mit Ihren Händen nicht zwischen die Rollator-Teile kommen. Sie könnten sich dabei verletzen.#
- Üben Sie beim Auseinanderfalten einen Druck auf die beiden Rohre für die Sitzflächenbespannung aus. Achten Sie bei jedem Auseinanderfalten des Rollators darauf, dass die Haken unter den Rohren für die Sitzflächenbespannung hinter dem Metallstab fühlbar einrasten.

Ihr Produkt

- 1: Handgriffe
- 2: Höhenverstellung der Handgriffe
- 3: Gehstockhalter
- 4: Bremshebel
- 5: Rückengurt
- 6: Sitzfläche
- 7: Tasche
- 8: Bremseinstellung
- 9: Räder



Besonderheiten des Rollators TRA32M

- Der Rollator ist so konstruiert, dass auch übergewichtigen Personen ihn als Gehilfe benutzen können.
- Die Handgriffe sind höhenverstellbar.
- Für eine platzsparende Aufbewahrung ist der Rollator faltbar.
- Die ergonomisch geformten Bremsgriffe sind zum kontinuierlichen Bremsen und zum Feststellen der Hinterräder geeignet.
- Zur Verbesserung der Manövrierfähigkeit haben die Hinterräder einen um 20% größeren Durchmesser als die Vorderräder.

Vor der Benutzung

Entfernen Sie vorsichtig alle Verpackungen, einschließlich der Pappröhren, die die Griffholme und die Bremseinheit abdecken. Überprüfen Sie das Produkt sorgfältig auf Schäden oder offensichtliche Mängel.

Packen Sie Ihr Produkt aus und kontrollieren Sie, ob die Lieferung vollständig ist. Die folgenden Teile sind im Lieferumfang enthalten:

- Gefalteter Rollator, inklusive 4 Räder
- Einkaufstasche
- Gehstockhalter
- Bedienungsanleitung

Versand und Aufbewahrung

Der Versand und die Aufbewahrung des Rollators sollten gemäß den technischen Daten erfolgen. Achten Sie darauf, dass der Rollator an einem trockenen Ort aufbewahrt wird. Schützen Sie den Rollator mit einer geeigneten Abdeckung oder Verpackung gegen Rost und das Eindringen von Fremdkörpern (z. B. Salzwasser, Seeluft, Sand und Staub). Achten Sie beim Aufbewahren des Rollators darauf, dass keine anderen Gegenstände auf dem Rollator abgelegt oder daran gelehnt werden, weil der Rollator hierdurch beschädigt werden kann.

Montage

Auseinanderfalten

Stellen Sie den Rollator auf die Räder. Drücken Sie die Sitzflächenhalterung links und rechts kräftig nach unten bis diese spür- und hörbar in die Arretierung am Rahmen einrastet (Siehe Bild 1). Der Rollator ist auseinandergefaltet.




Einsetzen der Griff-Holme

Befestigen Sie die höhenverstellbaren Holme mit den Griffen, indem sie diese in den Hauptrahmen gleiten lassen. Drücken Sie dabei die Rastknöpfe und schieben Sie die Holme leicht nach unten bis die Knöpfe vollständig einrasten und aus den Löchern schauen (Siehe Bild 2). Es sind 5 Griffhöhen einstellbar. Stellen Sie sicher, dass die Griffe auf gleicher Höhe sind.



Anbringen der Einkaufstasche

Halten Sie die Tasche an den oberen Schlaufen an beiden Seiten der Tasche. Führen Sie die Schlaufen über die beiden Holme der Sitzhalterung (Siehe Bild 3). Achtung! Der Taschenverschluss muss in Fahrtrichtung zeigen.

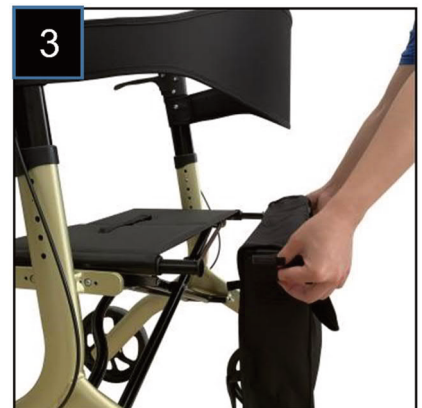

Nutzung des Rollators

Fahrtbremse

Die Fahrtbremse betätigen Sie, indem Sie beide Bremshebel in Richtung Handgriff ziehen (Siehe Bild 4). Bitte ziehen Sie beide Hebel gleichmäßig.



Feststellbremse

Wenn Sie den Rollator abstellen oder vor dem unabsichtlichen Wegrollen sichern wollen, drücken Sie beide Bremshebel nach unten (Siehe Bild 5). Diese müssen spürbar einrasten, sonst ist die Feststellbremse wirkungslos.



Einstellen der Bremsen

Zum Einstellen der Bremswirkung drehen Sie die Stellschrauben am Seilzug der Bremse am Hinterrad (Siehe Bild 6). Linksdrehung der Schraube bedeutet stärkere Bremswirkung. Achten Sie unbedingt auf eine gleichmäßige Bremswirkung auf beide Räder!




Rollator als Sitzgelegenheit

Stellen Sie den Rollator auf einen festen, ebenen und rutschfesten Untergrund ab. Betätigen Sie die Feststellbremse. Der Rollator muss feste stehen. Setzen Sie sich gerade hin und lehnen Sie sich nicht nach hinten. Achtung! Bewegen Sie den Rollator nicht, während Sie sitzen.

Zusammenfalten

Um den Rollator zusammen zu falten, umfassen Sie die Schlaufe auf der Mitte der Sitzfläche und ziehen diese kräftig nach oben (Siehe Bild 7). Die Sitzhalterung löst sich nun aus der Arretierung am Rahmen. Umfassen Sie beide Sitzhalterungen oder die Handgriffe und drücken den Rollator zusammen (Siehe Bild 8).

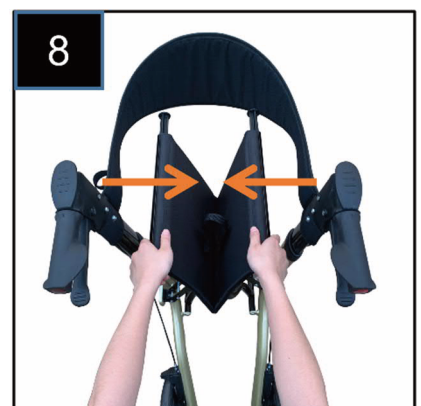

Wiederinbetriebnahme

Wenn Sie den Rollator nach längerem Abstellen oder Lagerung wieder in Betrieb nehmen wollen, überprüfen Sie bitte die Komponenten und Verschleißteile auf ihre Sicherheit und Funktionsfähigkeit.

Dies beinhaltet:

- verbogene oder beschädigte Rahmenteile oder Risse an den Rohrverbindungen,
- lose oder festsitzende Rastknöpfe,
- ausgeschlagene Einstelllöcher für die Höheneinstellung der Handgriffe,
- lose Handgriffe,
- lose Radbefestigungen, beschädigte Räder und abgefahrene Reifen,
- Funktion der Bremsanlage, leichtes Betätigen der Bremshebel, gleichmäßige Wirkung der Fahrt- und Feststellbremse

- Beschaffenheit des Sitzes und der Rückenlehne, Risse und starke Verschmutzungen
- Befestigung der Einkaufstasche.

Ersetzen Sie gegebenenfalls verschlissene oder defekte Teile bevor Sie den Rollator wieder in Betrieb nehmen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit wenden Sie sich zuerst an unseren Kundendienst service@weinberger-group.de

Pflege- und Wartungshinweise

- Den Rollator können Sie problemlos mit handelsüblichen Reinigungsmitteln reinigen, z.B. mit einem mit Spülmittel angefeuchtetem Tuch. Vermeiden Sie zur Reinigung Lösungsmittel, Benzine oder schleifende Reinigungsmittel. Nach jeder Reinigung sollten Sie den Rollator gründlich trocknen.
- Überprüfen Sie, dass alle Räder und der Klappmechanismus korrekt funktionieren und dass alle Räder sich frei bewegen können. Achten Sie besonders auf die Vorderräder, achten Sie darauf, dass sie sich frei und ohne Behinderung drehen und dass sie sicher am Rahmen befestigt sind.
- **Achtung!** Stellen Sie sofort den Gebrauch des Rollator ein, wenn sich die Räder schwer drehen lassen oder sie nicht sicher am Rahmen befestigt sind oder wenn Sie einen Schaden oder einen anderen Fehler vermuten.
- In monatlichen Kontrollen überprüfen Sie, ob alle Rastknöpfe ordnungsgemäß gesichert sind. Vergewissern Sie sich, dass keine Komponenten lose sind. Überprüfen Sie die Einstellung Ihrer Bremsen.
- Ölen Sie gelegentlich die Bowdenzüge (ein Tropfen Öl, z.B. Universalöl, an den Ansätzen der Bowdenzüge und an den Bremshebeln) und Fetten Sie die Radlager mit handelsüblichen Wälzlagerfett.
- Bringen Sie keine Teile oder Zubehörteile an Ihrem Rollator an, die von einer anderen Firma hergestellt wurden. Sie verlieren dadurch Ihren Garantieanspruch, und Ihre Sicherheit wird ernsthaft gefährdet.
- Wir empfehlen Ihnen, Ihren Rollator jeden Tag visuell zu überprüfen.
- Wir empfehlen auch, die Wartung des Rollators mindestens alle drei Monate durchzuführen.

Entsorgung

Am Ende seiner Lebensdauer muss der Rollator in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltgesetzen entsorgt werden. Am besten demontieren Sie den Rollator, um den Transport von wiederverwertbaren Materialien zu erleichtern.

Gewährleistung

Für den Rollator TRA32M gewähren wir die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren ab Kaufdatum. Während dieser Zeit wird der defekte Rollator kostenlos instandgesetzt. Nach Ablauf der Gewährleistung, haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, ihn durch den Kundendienst reparieren zu lassen. Sie erhalten vorab einen kostenfreien Kostenvoranschlag.

Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Schäden, die auf unsachgemäße Behandlung, Unfälle, Verschleiß, Nichtbeachten der Gebrauchsanweisung oder Änderungen durch Dritte zurückzuführen sind. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an service@weinberger-group.de

Technische Daten

Die nachstehenden technischen Daten gelten für diesen Rollator nur bei Standardeinstellungen und optimalen Umgebungsbedingungen. Berücksichtigen Sie diese Daten bei der Benutzung.






Maximales Gewicht des Benutzers:	200 kg
Abmessung (fahrbereit):	Breite: 780 mm, Länge: 700mm
Griffhöhe:	910 – 1010 mm (einstellbar in 5 Stufen)
Sitzhöhe:	ca. 580 mm
Sitzfläche:	560 x 295 mm
Nettogewicht des Rollators:	9,6 kg
Bruttogewicht des Rollators:	12,1 kg
Einsatzbereich Temperatur:	+5°C - +50°C
Einsatzbereich Luftfeuchtigkeit:	30% - 90%

Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Gesetzliche Grundlagen für das Inverkehrbringen in der EU

Der Rollator TRA32M, Art.-Nr.: 02262, ist gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte ein Medizinprodukt der Klasse 1.

Erklärung der Symbole und Bildzeichen

	Das Produkt ist konform der EU-Verordnung 2017/745.
	Siehe Bedienungsanleitung
	Hersteller
	Europa-Repräsentant
	Entsorgungshinweise

Hersteller

Foshan Oscar Medical Instrument Co., Ltd.

No.2 (Workshop C), Nanhai National Eco-Industrial Demonstation Park, Danzao Town, Nanhai District,
Foshan City, Guangdong Province, China

Europa – Repräsentant

SUNGO Europe B.V.

Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Niederlande

Importeur, Vertrieb und Service

Weinberger GmbH & Co.KG

Simonshöfchen 38

42327 Wuppertal

Deutschland

service@weinberger-group.de / Tel.: 02129-344664

Rev-Nr.: 0502202101